

Paso 1 para la detección: Usted recibió una Hoja de seguimiento con el kit del test:

Por favor verifique las informaciones que están a continuación, y complételas o corrijalas si es necesario

Apellido:
Nombre:
Apellido de nacimiento:
Dirección:

Fecha de nacimiento:
Teléfono:

Seguro : Número de asegurado/a :

Médico de cabecera:

Fecha de entrega O de envío del test:

Coloque aquí la etiqueta del código de barras del test

Fecha de la toma de muestra de las heces: --/--/----

Es indispensable inscribir con bolígrafo su nombre, apellido y fecha de nacimiento sobre el tubo del test

Al firmar:

- declaro haber sido informado/a sobre la forma cómo funciona el programa de detección precoz del cáncer, de sus ventajas y sus límites;
- autorizo la transmisión y el intercambio de mis datos médicos entre los profesionales que intervienen en el programa de detección precoz del cáncer, por correo o electrónicamente, como también el registro y archivo de mis datos en el Centro de detección precoz del cáncer. Estos datos permanecerán confidenciales; dispongo en todo momento de derecho de acceso y de rectificación de mis datos personales;
- autorizo el intercambio de informaciones entre el médico que mencioné más arriba y los profesionales del Centro de detección precoz del cáncer;
- autorizo la transmisión de los resultados de exámenes complementarios al programa de detección si el resultado de mi examen de detección así lo requiere;
- autorizo a que en caso de cambio de domicilio mi expediente se transmita al Centro de detección de mi nuevo cantón;
- declaro haber sido informado/a que mis datos anónimos pueden ser utilizados con fines estadísticos y de mejora de la calidad del programa de detección precoz.
- comprendo que este examen será facturado fuera de franquicia, por un monto de 46 francos, y que la factura será enviada solamente a mi seguro, sin copia al / a la asegurado/a, y que si lo deseo puedo pedir una copia de dicha factura a la FGDC.

Con una cruz en esta casilla rechazo la transmisión de mis datos nominativos de salud al Registro de tumores de Ginebra.

Fecha: --/--/---- Firma: _____

El kit «Test de detección» o test FIT comprende :

- Estas instrucciones
- Un tubo para recoger la muestra de heces
- Una cinta de papel para la recogida de las heces
- Una bolsa plástica
- Un sobre para el envío del test al laboratorio

Importante:

Es imprescindible indicar la fecha en la que haya realizado su test (recogida de las heces), de lo contrario no se puede analizar. También es importante enviarlo dentro de 24 horas y, por tanto, evitar ponerlo en el correo en vísperas de un día festivo. Para mujeres no menopáusicas: el test debe llevarse a cabo fuera del período menstrual

Verifique la exactitud de estas informaciones.

Inscriba la fecha de realización del test (recogida de la muestra de heces).

Despegue esta etiqueta del tubo y péguela sobre la hoja de seguimiento.

Por favor firme y anote la fecha en el párrafo de información y de autorización del tratamiento de datos.



Paso 2 para realizar su test :

1 Escriba en la etiqueta del tubo su apellido, nombre y fecha de nacimiento




2 Si fuera necesario orine, luego pegue sobre el inodoro (taza WC) la cinta de papel para la recogida de las heces tal como lo muestra el dibujo.



3 Evacúe (las heces no deben entrar en contacto con la orina ni con el agua del inodoro).



4 Abra el tubo plano desenroscando con cuidado la tapa de color turquesa: aparece la barra de muestreo.

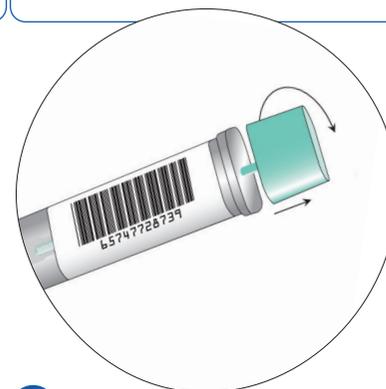


5 Raspe las heces en 5 o 6 áreas diferentes con la barra turquesa. Todas las ranuras se deben llenar con heces.


Cuidado: el exceso de heces impide la interpretación del test.



6 Coloque de nuevo la barra en el tubo de muestra y ciérrelo. Un clic sonoro confirma que el tubo ha sido sellado correctamente.

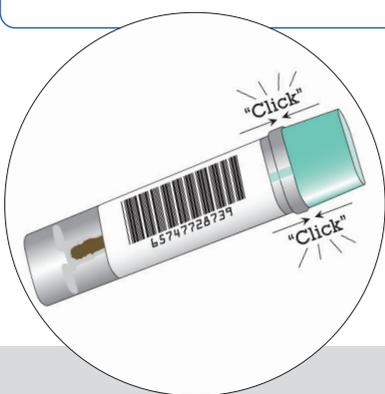

7 Agite el tubo sellado energicamente. Póngalo en la bolsa de plástico y luego en el sobre de envío.

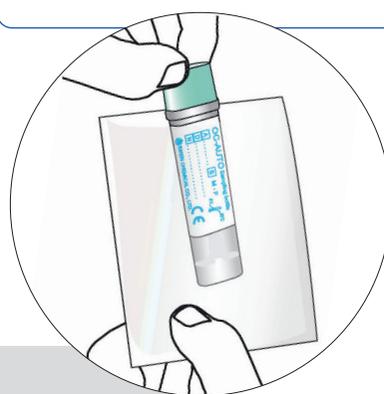

8 Envíe el tubo de la muestra **con la hoja de seguimiento** al laboratorio de análisis en un plazo máximo de 24 horas. Un envío rápido garantiza una mayor fiabilidad de la prueba.

